



**UWAGA! Przesyłkę kurierską z pobranym materiałem można nadać od poniedziałku do środy!**

**W CZWARTKI I PIĄTKI ODBIÓR NIE JEST REALIZOWANY – próba nadania przesyłki w tych dniach skutkować będzie potrzebą ponownego pobrania materiału !!!**

### Uwagi przed badaniem:

- **niektóre leki i / lub suplementy mogą utrudniać analizę ; przed przerwaniem przyjmowania wszelkich leków należy skonsultować się z lekarzem;**
- Badanie najlepiej wykonać przed rozpoczęciem leczenia; do leków utrudniających przeprowadzenie analizy należą m.in.: związki baru, bizmutu i magnezu, leki przeciwgorączkowe, olej rycynowy, niektóre antybiotyki.
- Zaleca się pobieranie materiału nie wcześniej niż 2 tygodnie po zakończeniu kuracji.

*Jeśli masz wątpliwości przed pobraniem materiału – skontaktuj się z jednostką zlecającą badanie!*

### Pobranie materiału

*UWAGA! Zanim pobierzesz materiał do badania umieść w zamrażarce poduszeczki chłodzące z żelom załączone do zestawu pobraniowego (do momentu ich całkowitego zamrożenia). Jest to niezbędne aby zapewnić jak najlepsze warunki transportu materiału do badań laboratoryjnych.*

1. Przed przystąpieniem do pobrania materiału należy sprawdzić, czy otrzymany zestaw zawiera wszystkie elementy. Kompletny zestaw do badania zawiera: 3 pojemniki z łopatką na kał, 1 torebkę plastikową na próbki, 3 nakładki na toaletę, białe styropianowe pudełko + gumkę przytrzymującą wieczko, żelki chłodzące, skierowanie, instrukcję, kurierską folię transportową, naklejkę z adresem wysyłki.
2. Przed oddaniem kału należy całkowicie opróżnić pęcherz moczowy.
3. Kału nie należy pobierać z urządzeń sanitarnych, tylko z czystej, specjalnie przeznaczonej do tego celu podkładki toaletowej na kał (załączonej do zestawu).
4. Papierową podkładkę toaletową na kał należy przykleić do deski toalety według załączonej instrukcji (po pobraniu materiału do badania podkładkę można spłukać).
5. Należy pobierać 3 próbki w odstępach 3-dniowych do 3 osobnych pojemników. Kał należy pobrać łopatką przytwierdzoną do pokrywki z 5 miejsc kału do **MAKSYMALNIE** ½ objętości pojemnika (Rys. 1). Pojemniki z kałem w kolejnych dniach po pobraniu trzeba przechowywać w lodówce.
6. Wszystkie 3 pobrane pojemniki z kałem należy dokładnie opisać: imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz napisać datę i godzinę pobrania.
7. Trzy pojemniki z kałem należy umieścić w plastikowym woreczku (załączonym do zestawu).
8. Plastikowy woreczek zawierający pojemniki z kałem i poduszeczki chłodzące (wcześniej zamrożone), należy umieścić w styropianowym pudełku, które należy zamknąć wieczkiem i zabezpieczyć załączoną gumką. Dokładnie i dwustronnie wypełnione skierowanie umieścić przy styropianowym pojemniku za gumką.



Rys. 1

9. Wszystkie elementy wymienione w pkt. 8 należy umieścić w załączonej do zestawu koperty foliowej.
10. Foliową kopertę należy zakleić i przekazać kurierowi zamówionemu wcześniej przez Cambridge Diagnostics (Polska).

## Wysyłka materiału

**UWAGA! Przesyłkę kurierską z pobranym materiałem można nadać od poniedziałku do środy!**

**W CZWARTKI I PIĄTKI ODBIÓR NIE JEST REALIZOWANY – próba nadania przesyłki w tych dniach skutkować będzie potrzebą ponownego pobrania materiału !!!**

Ostatniej próbki materiału nie należy pobierać i wysyłać w piątek tylko na początku tygodnia! Ostatnią próbkę kału najlepiej jest pobrać rano, następnie do godziny 12:00 (do godz. 10:00 w przypadku zamieszkania na wsi i w małej miejscowości) należy skontaktować się z Cambridge Diagnostics pod tel.: 22 8310102, aby został zamówiony kurier na wskazany adres.

Do momentu przyjazdu kuriera próbki muszą być przechowywane w lodówce, a poduszeczki chłodzące w zamrażarce. Klient przed przekazaniem przesyłki kurierowi chowa próbki, saszetki chłodzące i wypełnione skierowanie do styropianowego pudełka z oznaczeniem UN3373, które umieszcza w foliowej kopercie.

Transport materiału nie musi odbywać się w warunkach specjalnych, ponieważ poduszki chłodzące i styropianowe opakowanie zapewniają odpowiednią temperaturę transportu. Cambridge Diagnostics zastrzega sobie niepodjęcie diagnostyki materiału w przypadku stwierdzenia braku płatności.

### **Badanie Parazyt należy wysłać na adres:**

AI-Med. Laboratorium Analityczno-Bakteriologiczne  
ul. Przedborska 2  
97-500 Radomsko  
tel. 606 116 885

**Warunki przechowywania próbki po pobraniu:** Pierwsza próbka max 12 dni w lodówce (2-8°C).  
**(do momentu wystania)** Nie zamrażać!

**Czas oczekiwania na badanie:** 15 dni roboczych

Cambridge Diagnostics (Polska) Sp. z o.o.

00-444 Warszawa, ul. Górnośląska 4A; Tel.: 22 831 01 02, 22 831 66 03  
e-mail: info@cambridge-diagnostics.pl, www.cambridge-diagnostics.pl

