

Instrukcja pobrania próbki krwi

1. Umyj ręce w ciepłej wodzie, co zmiękczy skórę i poprawi przepływ krwi.
2. Wyjmij 2 małe próbówki (microvette) z plastikowych probówek ochronnej. Z microvette zdejmij białe osłonki.
3. Wybierz palec, z którego będzie pobierana krew, oczyść gazikiem dezynfekcyjnym (zawartym w zestawie) i pozostaw do wyschnięcia.
4. Zdejmij osłonkę z lancetu (kolor lancetu może być różny) (1).
5. Naciśnij kciukiem na opuszek palca, z którego będzie pobierana krew, aby napiąć skórę. Następnie przyłóż do skóry czerwony koniec lancetu i delikatnie go naciśnij (2). Poczujesz niewielkie ukłucie w trakcie przebicia skóry.
6. Delikatnie pomasuj palec w kierunku ukłucia, aby uzyskać kropelkę krwi.
7. Przeciągnij delikatnie przekuty palec po obrzeżu próbówki, tak żeby krew spłynęła do środka. Powtarzaj tę czynność do póki nie zapełnisz krwią próbówek do wyznaczonej kreski (3)*
8. Po pobraniu próbki, nałóż z powrotem białą osłonkę na próbówkę i kilkakrotnie wstrząśnij probówką, aby krew się dobrze wymieszała. Podpisz próbówki (imię, nazwisko, pesel).
9. Włóż próbówkę do środka plastikowego pojemnika ochronnego (4).
10. Wypełnij załączony formularz (imię, nazwisko, pesel, dane kontaktowe) i oznacz, jaki test chcesz wykonać.
11. Zużyty lancet umieść ponownie do plastikowego woreczka.
12. W plastikowym pudełku zestawu umieść:
 - (a) Plastikowy pojemnik, w którym są umieszczone próbówki z Twoją krwią
 - (b) Wypełniony formularz
13. Wyślij zestaw z próbką krwi na adres załączony w zestawie.



* Dodatkowy lancet jest dołączony w przypadku potrzeby przekłucia drugiego palca, żeby uzyskać odpowiednią ilość krwi.

W razie potrzeby proszę dzwonić na telefon: (22) 831 66 03

Zabezpieczony lancet

Wyprodukowany i oznaczony symbolem CE zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC przez MediPurpose Pte Ltd. Singapore. Numer Partii: NSP45/2013 **DO JEDNORAZOWEGO UŻYCIA.**

Microvette

Wyprodukowana i oznaczona symbolem CE zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC przez Sarstedt Ltd, 68 Bolton Road, Leicester LE4 1AW. Numer Partii: 7070801 **DO JEDNORAZOWEGO UŻYCIA.**



Zestaw jest wyprodukowany i dostarczony przez
Cambridge Nutritional Sciences, Wielka Brytania

Cambridge Diagnostics (Polska) Sp. z o.o.

00-444 Warszawa, ul. Górnośląska 4A; Tel.: 22 831 01 02, 22 831 66 03

e-mail: info@cambridge-diagnostics.pl, www.cambridge-diagnostics.pl



ZESTAW DO POBRANIA PRÓBKII KRWI

Przed rozpoczęciem zapoznaj się dokładnie z Instrukcją pobrania próbki krwi.

Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Opakowanie zawiera:

1. 2 x Microvette® (próbówka do pobrania krwi)
2. Zabezpieczony lancet do przekłucia palca
3. Gazik dezynfekcyjny
4. Plaster z opatrunkiem
5. Plastikowy woreczek na zużyte materiały
6. 2 x Plastikowy pojemnik ochronny dla próbówki
7. Formularz zamówienia
8. Instrukcja pobierania próbki krwi

