



## **INSTRUKCJA POBRANIA MATERIAŁU DO BADANIA NA PASOŻYTY**

Szanowni Państwo,

Przesyłamy zestaw do pobrania kału w celu wykonania badania laboratoryjnego na obecność pasożytów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją pobrania materiału do badania.

**UWAGA ! Przesyłkę kurierską z pobranym materiałem można nadać tylko od poniedziałku do czwartku!**

Uwagi przed badaniem:

- **Niektóre leki i/lub suplementy mogą wpływać na wyniki testów;** przed przzerwaniem przyjmowania wszelkich leków należy konsultować się z lekarzem;
- **Badanie najlepiej wykonać przed rozpoczęciem leczenia, do leków utrudniających przeprowadzenie analizy należą m.in.:** związki baru, bizmutu i magnezu, leki przeciwgorączkowe, olej rycynowy, niektóre antybiotyki.
- Zaleca się pobieranie materiału nie wcześniej niż 2 tygodnie po zakończeniu kuracji.

Jeśli masz wątpliwości przed pobraniem materiału – skontaktuj się z nami: 724 200 052

## **POBRANIE MATERIAŁU**

*Uwaga! Zanim pobierzesz materiał do badania umieść w zamrażarce na kilka godzin poduszczone chłodzące z żelami załączone do zestawu pobraniowego (do momentu ich całkowitego zamrożenia). Jest to niezbędne, aby zapewnić jak najlepsze warunki transportu materiału do badań laboratoryjnych.*

1. Przed przystąpieniem do pobrania materiału należy sprawdzić, czy otrzymany zestaw zawiera wszystkie elementy. Kompletny zestaw do badania zawiera: 2 pojemniki z łopatką na kał, 2 nakładki na toaletę, białe styropianowe pudełko + gumkę przytrzymującą wieczko, żelki chłodzące, skierowanie, instrukcję, kurierską folię transportową.
2. Wypełnij skierowanie dołączone do zestawu.
3. Przed przystąpieniem do pobrania materiału należy całkowicie opróżnić pęcherz moczowy.
4. Kału nie należy pobierać z urządzeń sanitarnych, tylko z czystej, specjalnie przeznaczonej do tego celu podkładki toaletowej na kał (załączonej do zestawu).
5. Papierową podkładkę toaletową na kał należy przykleić do deski toalety wg załączonej instrukcji (po pobraniu materiału do badania podkładkę można splukać).
6. Należy pobierać 2 próbki w odstępach 2-3-dniowych do 2 osobnych pojemników. Kał należy pobrać łopatką przytwierdzoną do pokrywy z **5 miejsc** kału do **MAKSYMALNIE ½ objętości** pojemnika. Pojemniki z kałem w kolejnych dniach po pobraniu trzeba przechowywać w lodówce.
7. Wszystkie 2 pobrane pojemniki z kałem należy dokładnie opisać imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz napisać datę i godzinę pobrania.

8. Do czasu wysłania, kał należy przechowywać w lodówce, a poduszeczki chłodzące w zamrażarce.

**Warunki przechowywania próbki po pobraniu (do momentu wysłania):** Pierwsza próbka max 12 dni w lodówce (2-8 stopni C). Kału nie zamrażać!

**Czas oczekiwania na badanie:** 15 dni roboczych od momentu dostarczenia próbki do laboratorium.

### Wysyłka materiału

1. Przygotowanie zestawu do wysyłki: należy pojemniki z kałem umieścić w plastikowym woreczku (załączonym do zestawu) razem z poduszkami chłodzącymi. Skierowanie razem z plastikowym woreczkiem z kałem i poduszkami należy umieścić w styropianowym pudełku, a następnie zamknąć wieczkiem.
2. Styropianowe pudełko należy umieścić w załączonej do zestawu kopercie.
3. Badanie można nadać dowolną firmą kurierską w dniach poniedziałek-czwartek na adres laboratorium: Laboratorium Al-Med ul. Przedborska 2 97-500 Radomsko lub nadać w paczkomacie Inpost według poniższej instrukcji:

**Proszę nadać badanie do laboratorium Al.-Med. poprzez InPost Paczkomaty, wchodząc w poniższy link i wypełniając formularz.**

**LINK:** <https://szybkiewzroty.pl/pl/cme>

#### **CME – Medycyna Ekologiczna**

1. Wypełnij wymagane dane oznaczone gwiazdką\*
2. **Numer zamówienia i numer zwracanej paczki** wpisz **97500**
3. Po otrzymaniu wiadomości SMS/e-mail z InPost, przepisz otrzymany w niej kod na przygotowaną paczkę – możesz użyć flamastra/markera lub długopisu – nie musisz wpisywać żadnych innych danych na paczkę. Usuń stare etykiety.
4. Podejdź z paczką do wybranego paczkomatu i na ekranie wybierz Nadaj paczkę, a następnie Mam kod zwrotu. Wpisz 10-cyfrowy kod zwrotu i zatwierdź go na ekranie.

**Badania można nadawać tylko od poniedziałku do czwartku w dni robocze.**

Dziękujemy za skorzystanie z usług,

**CME – Medycyna Ekologiczna**

[www.medycynaekologiczna.com.pl](http://www.medycynaekologiczna.com.pl)